

Vastuuvapauslauseke

Shaker Deluxe ei ole lelu. Shaker Deluxe on tarkoitettu ainoastaan hengitysharjoituksiin. Mitään muuta käyttöä ei suositella.

Tämän käyttöohjeen aineisto on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen. POWERbreathe International Ltd ei anna mitään selvityksiä tai takuita tästä käyttöohjeesta tai siinä kuvatuista tuotteista. POWERbreathe International Ltd ei ole vastuussa vahingoista, suorista tai satunnaisista, välillisistä tai erityisistä, jotka johtuvat tämän materiaalin tai siinä kuvattujen tuotteiden käytöstä.

Shaker Deluxe on patentoitu tuote. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta valmistajan jatkuvasta kehitysohjelmasta johtuen. Mitään väitteitä ei esitetä tai anneta ymmärtää laitteen käytöstä tai tuloksista.

POWERbreathe-logo on POWERbreathe Holdings Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki POWERbreathe-tuotenimet ovat POWERbreathe Holdings Ltd:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. E & OE © 04/2017.

Kaikki tiedot ovat oikein painoonmenohetkellä.

Rajoitettu 12 kuukauden valmistajan takuu:

Powerbreathe International Ltd. valmistaa Shaker Deluxen kansainväliseen jakeluun yksinoikeudella. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla saattaa olla myös muita lakisäätöisiä oikeuksia. POWERbreathe International Ltd takaa täten alkuperäiselle ostajalle, jonka nimi on asianmukaisesti rekisteröity, että sen myymä tuote on virheetön materiaalin ja valmistuksen osalta.

Tämä takuun mukaiset POWERbreathe International Ltd:n velvollisuudet rajoittuvat laitteen

Mikä on Shaker Deluxe?

Shaker Deluxe on helppokäyttöinen hengityslaitte keuhkoeritteiden, kuten lima ja katarri, saamiseksi liikkeelle. Shaker Deluxe on kehitetty käyttämällä uusinta suunnitteluteknologiaa. Ergonominen ja helppokäyttöinen, asennusta ei vaadita.

Miten Shaker Deluxe toimii?*

Shakerin kotelon sisällä on painotettu pallo. Hengittäessä Shaker Delux -laitteeseen pallo nousee ja laskee sen jälkeen omalla painollaan. Tämä nousu ja lasku tapahtuu äärimmäisen nopeasti, ja se tuntuu käyttäjälle värähtelynä. Värähtely yhdistettynä palloa vastaan hengittämisen muodostamaan lievään vastukseen tuottaa useita etuja. Ilmanpaineen muutokset kannustavat pieniä hengitysteitä avautumaan, mikä lisää keuhkojen käyttöä ja tehokkuutta. Värähtely ohentaa tai irrottaa limaa ja lisääntynyt ilmavirtaus auttaa limaa siirtymään suuriin hengitysteihin, missä kevyt yskiminen voi poistaa sen.

Shaker Deluxea voidaan käyttää missä vain, ja se tarjoaa helpon ja mukavan helpotuksen liiallisesta limasta ja siihen liittyvistä ongelmista. Shaker Deluxe -laitetta voidaan käyttää kroonisiin sairauksiin, kuten keuhkoastma, astma, keuhkolaajentuma ja akuutteihin ongelmiin, kuten limaisa yskä, flunssa ja keuhkoputkentulehdus. Tyhjentämällä hengitystiet keuhkotulehdusten ja keuhkojen vaurioitumisen riski pienenee. Keuhkojen toiminta paranee myös, mikä vähentää hengästyneisyyttä ja väsymystä.

Kuinka Shaker Deluxe -laitetta käytetään

Istu tai makaa ja muodosta huulillasi tiiviste suukappaleen ympärille. Varmista, että suukappale on vaakatasossa.

Hengitä sisään nenän kautta ja ulos suun kautta.

Sijoita laite siten, että se muodostaa enimmäisvärähtelyn keuhkoihin, mikä pitäisi tuntea helposti asettamalla käsi rinnan päälle uloshengityksen aikana.

Yskäise kevyesti ja poista eritteet säännöllisesti tai tarpeen mukaan.

sellaisten osien korjaukseen ja vaihtoon, joissa on todettu tarkastuksessa materiaali- tai valmistusvirhe. Väärinkäyttö tai onnettomuudet, varotoimenpiteiden laiminlyönti, vääränlainen huolto tai kaupallinen käyttö ja rikkoutuneet pakkaukset eivät kuulu tämän takuun piiriin. Kahden vuoden takuuaan aikana tuote joko korjataan tai vaihdetaan (valintamme mukaan maksutta). Takuu ei kata vahinkoja tai välillisiä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet huollosta, jota POWERbreathe International Ltd ei ole valtuuttanut.

Takuu ammatilliseen, kaupalliseen tai laitospalveluun rajoittuu 3 kuukauteen (90 päivää) ostopäivästä. Kaikki muut ehdot pysyvät samoina.

Tähän sisältyvät takuut ovat muiden takuiden sijasta, mukaan lukien oletetut takuuta kaupallisuudesta ja/tai sopivuudesta tarkoitukseen.

Aktivoidaksesi takuun varmista, että rekisteröit “Shaker Deluxe” -tuotteen oston vieraillemalla osoitteessa www.powerbreathe.com

Yhteystiedot

Pääkonttori:
POWERbreathe International Ltd
Northfield Road, Southam, Warwickshire
CV47 0FG, England, UK
www.powerbreathe.com
Puhelin: +44 (0) 1926 816100

Valmistettu Brasiliassa
yksinomaan POWERbreathe International Ltd: lle.
This Product is Protected by Patent and Design Copyright ©

CE MDD 93/42/EEC **EC REP** POWERbreathe International Ltd **FIN** E & OE © 4/2017 JN.4023 V1

Varotoimet


- Shaker Deluxe -laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä hygienian vuoksi pidä jakaa toisten käyttäjien kanssa.
- Henkilöt joilla on ilmarinta, eivät saa käyttää Shaker Deluxe -laitetta.
- Henkilöt, joilla on vakava sydän- ja verisuonitauti, saavat käyttää Shaker Deluxe -laitetta vain lääkärin ohjeen mukaan.
- Älä tee mitään muutoksia lääkemääräyksiin tai määrättyyn hoito-ohjelmaan kysymättä neuvoa lääkäriltä.
- Aikuisten valvontaa saatetaan tarvita, kun laitetta käyttävät alle 16-vuotiaat lapset.
- Jos sinua alkaa huimata käyttäessäsi Shaker Deluxe -laitetta, pysäytä käyttö ja hengitä rauhallisesti nenän kautta, kunnes tunne häviää. Jos tunnet huimausta aina käyttäessäsi Shaker Deluxe -laitetta, hengitä sisään ja ulos ilman Shaker Deluxe -laitetta joka 3. kerta. Jos huimaus jatkuu tai muita ongelmia ilmenee Shaker -laitetta käytettäessä, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja kysy neuvoa lääkäriltä.
- Shaker Deluxe on tarkoitettu keuhkoeritteiden saamiseksi liikkeelle. Mikään muu käyttö ei ole tarkoituksellista. Tämä tuote ei ole tarkoitettu minkään sairauden diagnoosia, hoitoa tai ehkäisyä varten.
- Vain sinetöidyssä pakkauksessa myytyjä laitteita saa käyttää.
- Säilytä viileässä, kuivassa paikassa poissa suorista lämmönlähteistä ja auringonvalosta.
- Tämä tuote on sinetöity hygienian säilyttämiseksi, eikä sitä voida palauttaa, jos sinetti on rikki.

Tekniset tiedot

Runko, kartio, kansi ja suukappale on valmistettu ruiskutetusta polyamidista. Painotettu pallo on nikkelipinnoitettua terästä/ruostumatonta terästä


Shakerdeluxe™
by **POWERbreathe**

Käyttöohje

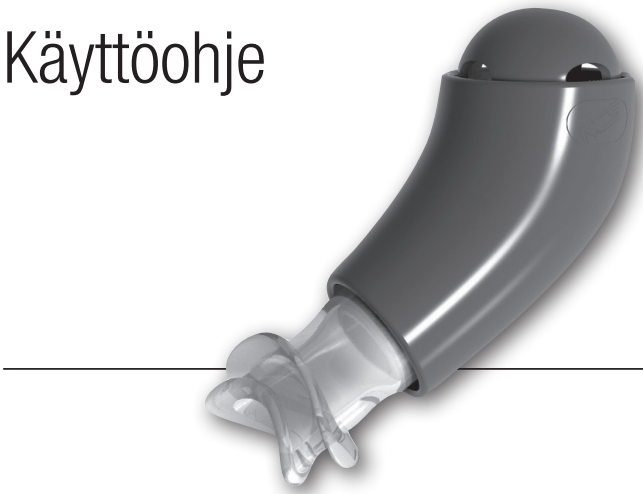

Hoito ja huolto

Koska Shaker Deluxe altistuu syljelle käytön aikana, suosittelemme puhdistamaan Shaker Deluxe -laitteen käytön jälkeen. Poista suukappale, ruuvaa takakansi irti ja poista pallo ja sisäkartio. Pese kaikki osat saippuavedessä, huuhtelee puhtaalla vedellä, kuivaa huolellisesti ja asenna takaisin. Suosittelemme puhdistamaan laitteen kerran viikossa hyväksytyillä puhdistustableteilla.

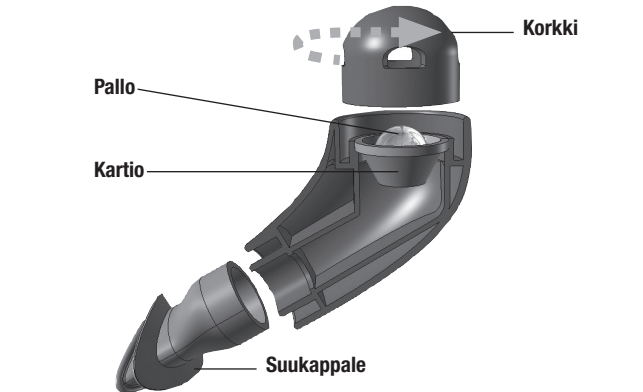

Mikä on Shaker Deluxe?

Shaker Deluxe on helppokäyttöinen hengityslaitte keuhkoeritteiden, kuten lima ja katarri, saamiseksi liikkeelle. Shaker Deluxe on kehitetty käyttämällä uusinta suunnitteluteknologiaa. Ergonominen ja helppokäyttöinen, asennusta ei vaadita.

Miten Shaker Deluxe toimii?*

Shakerin kotelon sisällä on painotettu pallo. Hengitettäessä Shaker Delux -laitteeseen pallo nousee ja laskee sen jälkeen omalla painollaan. Tämä nousu ja lasku tapahtuu äärimmäisen nopeasti, ja se tuntuu käyttäjälle värähtelynä. Värähtely yhdistettynä palloa vastaan hengittämisen muodostamaan lievään vastukseen tuottaa useita etuja. Ilmanpaineen muutokset kannustavat pieniä hengitysteitä avautumaan, mikä lisää keuhkojen käyttöä ja tehokkuutta. Värähtely ohentaa tai irrottaa limaa ja lisääntynyt ilmavirtaus auttaa limaa siirtymään suuriin hengitysteihin, missä kevyt yskiminen voi poistaa sen.

Shaker Deluxea voidaan käyttää missä vain, ja se tarjoaa helpon ja mukavan helpotuksen liiallisesta limasta ja siihen liittyvistä ongelmista. Shaker Deluxe -laitetta voidaan käyttää kroonisiin sairauksiin, kuten keuhkoastma, astma, keuhkolaajentuma ja akuutteihin ongelmiin, kuten limaisa yskä, flunssa ja keuhkoputkentulehdus. Tyhjentämällä hengitystiet keuhkotulehdusten ja keuhkojen vaurioitumisen riski pienenee. Keuhkojen toiminta paranee myös, mikä vähentää hengästymistä ja väsymystä.

Kuinka Shaker Deluxe -laitetta käytetään

Istu tai makaa ja muodosta huulillasi tiiviste suukappaleen ympärille. Varmista, että suukappale on vaakatasossa.

Hengitä sisään nenän kautta ja ulos suun kautta.

Sijoita laite siten, että se muodostaa enimmäisvärähtelyn keuhkoihin, mikä pitäisi tuntea helposti asettamalla käsi rinnan päälle uloshengityksen aikana.

Yskäise kevyesti ja poista eritteet säännöllisesti tai tarpeen mukaan.

Vastuuvapauslauseke

Shaker Deluxe ei ole lelu. Shaker Deluxe on tarkoitettu ainoastaan hengitysharjoituksiin. Mitään muuta käyttöä ei suositella.

Tämän käyttöohjeen aineisto on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen. POWERbreathe International Ltd ei anna mitään selvityksiä tai takuita tästä käyttöohjeesta tai siinä kuvatuista tuotteista. POWERbreathe International Ltd ei ole vastuussa vahingoista, suorista tai satunnaisista, välillisistä tai erityisistä, jotka johtuvat tämän materiaalin tai siinä kuvattujen tuotteiden käytöstä.

Shaker Deluxe on patentoitu tuote. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta valmistajan jatkuvasta kehitysohjelmasta johtuen. Mitään väitteitä ei esitetä tai anneta ymmärtää laitteen käytöstä tai tuloksista.

POWERbreathe-logo on POWERbreathe Holdings Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki POWERbreathe-tuotenimet ovat POWERbreathe Holdings Ltd:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. E & OE © 04/2017.

Kaikki tiedot ovat oikein painonmenohetkellä.

Rajoitettu 12 kuukauden valmistajan takuu:

Powerbreathe International Ltd. valmistaa Shaker Deluxen kansainväliseen jakeluun yksinoikeudella. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla saattaa olla myös muita lakisääteisiä oikeuksia. POWERbreathe International Ltd takaa täten alkuperäiselle ostajalle, jonka nimi on asianmukaisesti rekisteröity, että sen myymä tuote on virheetön materiaalin ja valmistuksen osalta.

Tämä takuun mukaiset POWERbreathe International Ltd:n velvollisuudet rajoittuvat laitteen

Varotoimet

- Shaker Deluxe -laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä hygienian vuoksi pidä jakaa toisten käyttäjien kanssa.
- Henkilöt joilla on ilmarinta, eivät saa käyttää Shaker Deluxe -laitetta.
- Henkilöt, joilla on vakava sydän- ja verisuonitauti, saavat käyttää Shaker Deluxe -laitetta vain lääkärin ohjeen mukaan.
- Älä tee mitään muutoksia lääkemääräyksiin tai määrättyyn hoito-ohjelmaan kysymättä neuvoa lääkäriltä.
- Aikuisten valvontaa saatetaan tarvita, kun laitetta käyttävät alle 16-vuotiaat lapset.
- Jos sinua alkaa huimata käyttäessäsi Shaker Deluxe -laitetta, pysäytä käyttö ja hengitä rauhallisesti nenän kautta, kunnes tunne häviää. Jos tunnet huimausta aina käyttäessäsi Shaker Deluxe -laitetta, hengitä sisään ja ulos ilman Shaker Deluxe -laitetta joka 3. kerta. Jos huimaus jatkuu tai muita ongelmia ilmenee Shaker -laitetta käytettäessä, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja kysy neuvoa lääkäriltä.
- Shaker Deluxe on tarkoitettu keuhkoeritteiden saamiseksi liikkeelle. Mikään muu käyttö ei ole tarkoituksellista. Tämä tuote ei ole tarkoitettu minkään sairauden diagnoosia, hoitoa tai ehkäisyä varten.
- Vain sinetöidyssä pakkauksessa myytyjä laitteita saa käyttää.
- Säilytä viileässä, kuivassa paikassa pois suorista lämmönlähteistä ja auringonvalosta.
- Tämä tuote on sinetöity hygienian säilyttämiseksi, eikä sitä voida palauttaa, jos sinetti on rikki.

Tekniset tiedot

Runko, kartio, kansi ja suukappale on valmistettu ruiskutetusta polyamidista. Painotettu pallo on nikkelipinnoitettua terästä/ruostumatonta terästä

sellaisten osien korjaukseen ja vaihtoon, joissa on todettu tarkastuksessa materiaali- tai valmistusvirhe. Väärinkäyttö tai onnettomuudet, varotoimenpiteiden laiminlyönti, vääränlainen huolto tai kaupallinen käyttö ja rikkoutuneet pakkaukset eivät kuulu tämän takuun piiriin. Kahden vuoden takuajan aikana tuote joko korjataan tai vaihdetaan (valintamme mukaan maksutta). Takuu ei kata vahinkoja tai välillisiä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet huollosta, jota POWERbreathe International Ltd ei ole valtuuttanut.

Takuu ammatilliseen, kaupalliseen tai laitostarkoitukseen rajoittuu 3 kuukauteen (90 päivää) ostopäivästä. Kaikki muut ehdot pysyvät samoina.

Tähän sisältyvät takuut ovat muiden takuiden sijasta, mukaan lukien oletetut takuuta kaupallisuudesta ja/tai sopivuudesta tarkoitukseen.

Aktivoidaksesi takuun varmista, että rekisteröit “Shaker Deluxe” -tuotteen oston vieraillemalla osoitteessa www.powerbreathe.com

Yhteystiedot

Pääkonttori:
POWERbreathe International Ltd
Northfield Road, Southam, Warwickshire
CV47 0FG, England, UK
www.powerbreathe.com
Puhelin: +44 (0) 1926 816100

Valmistettu Brasiliassa
yksinomaan **POWERbreathe International Ltd: lle**.
This Product is Protected by Patent and Design Copyright ©



MDD 93/42/EEC




POWERbreathe International Ltd



E & OE © 4/2017 JN.4023 V1

Hoito ja huolto

Koska Shaker Deluxe altistuu syljelle käytön aikana, suosittelemme puhdistamaan Shaker Deluxe -laitteen käytön jälkeen. Poista suukappale, ruuvaa takakansi irti ja poista pallo ja sisäkartio. Pese kaikki osat saippuavedessä, huuhtelee puhtaalla vedellä, kuivaa huolellisesti ja asenna takaisin. Suosittelemme puhdistamaan laitteen kerran viikossa hyväksytyillä puhdistustableteilla.

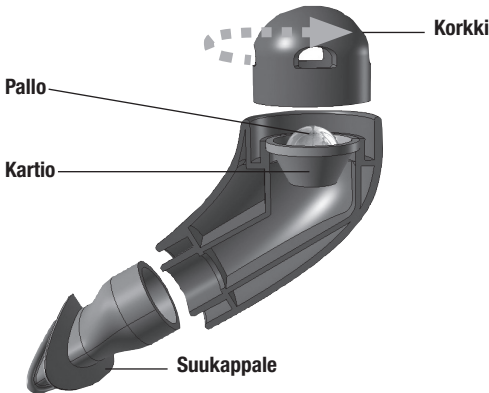

Käyttöohje

